

# Bedienungsanleitung


Steh- und Transferhilfe "K-Mover"  
Art.: TRH-KOV-11992121



**Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes, muss diese Anleitung gelesen und nachvollzogen werden. Das Gerät darf ausschliesslich nur von geschultem Personal verwendet werden.**

**Die Sicherheitshinweise aus der Anleitung sind unbedingt zu befolgen und einzuhalten, um Unfälle oder Schäden zu vermeiden!**

# Gerätebeschreibung

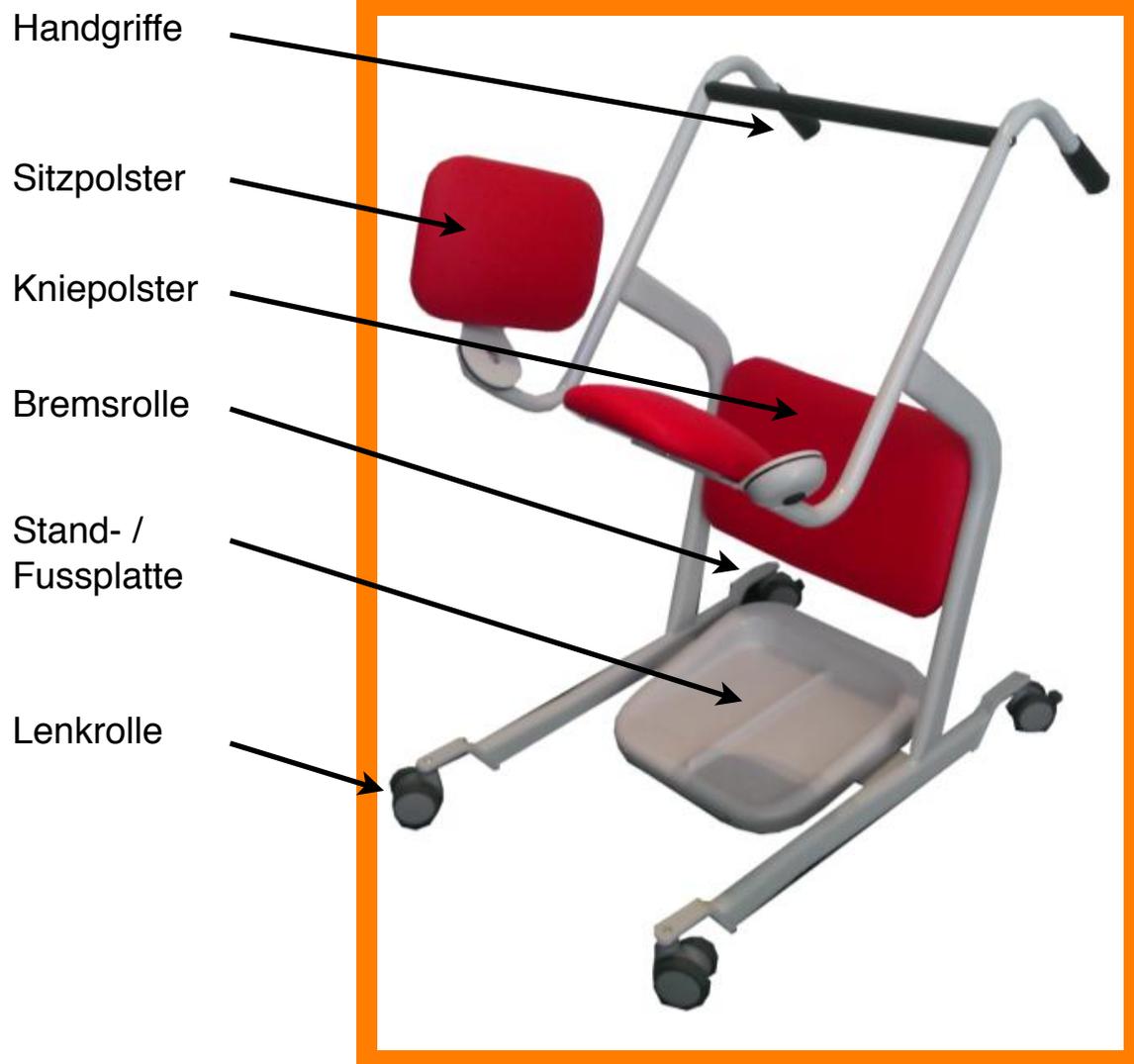

## Technische Informationen

Breite:	575 mm
Länge:	860 mm
Höhe:	1060 mm
Gewicht:	19,6 kg
Zulässige Nutzlast:	150 kg

## Verwendung und Nutzung

Die Steh- und Transferhilfe K-Mover ist für das leichtere Handling von Bewohnern / Patienten gedacht, welche noch selbständig stehen und gehen können aber trotzdem Hilfestellungen benötigen. Der K-Mover kann als Aufsteh- und Transporthilfe genutzt werden, wodurch die Hilfestellung beschleunigt und das Personal entlastet wird.

Anwendungsbeispiele:

- Aufstehhilfe - Der Bewohner kann sich selbständig aufrichten
- Transferhilfe - Mobile Bewohner mit Gehbeschwerden können schneller in sitzender Position durchs Haus transportiert und umgesetzt werden. Egal ob Toilettengang oder der normale Umsetzvorgang.

**HINWEIS:**

**ES DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH NUR BEWOHNER / PATIENTEN, WELCHE NOCH SELBSTÄNDIG STEHEN UND GEHEN KÖNNEN MIT DEM K-MOVER UMGESETZT BZW. TRANSPORTIERT WERDEN!**

## CE-Kennzeichnung

CE-Kennzeichnung bezieht sich auf die Richtlinie 93/42/EWG für medizinische Produkte.

## Garantiebestimmungen

Der Hersteller des Produktes ist nur dann für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes verantwortlich, wenn:

- Das Produkt nur im Sinne vom Verwendungszweck eingesetzt wird.
- Die Kontrolle über die Funktionen werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt.

## Transportschäden

Bei der Lieferung, überprüfen Sie bitte, ob das Produkt oder die Verpackung in irgendeiner Weise beschädigt ist.

**Meldefristen:**

Es besteht ein 2-Tages-Frist auf sichtbare Schäden und eine 7-Tage-Frist für versteckte Schäden. Massgebend ist der Tag an dem die Lieferpapiere unterzeichnet wurden!

## Seriennummer

Die Seriennummer Ihres K-Movers finden Sie unten am Fahrgestell. Bitte geben Sie diese immer bei Beanstandungen oder Ersatzteilbestellungen an.

# Anwendung

## **HINWEIS:**

***Vor dem Benutzen des K-Movers, muss der Anwender das Gerät einer Sichtprüfung unterziehen, ob sich das Gerät in einem einwandfreien Zustand befindet. Beschädigte Teile können zu Verletzungen führen, in diesem Fall darf das Gerät nicht benutzt werden.***

Befolgen Sie die unten aufgeführten Arbeitsschritte für eine richtige Handhabung des Gerätes:



Schwenken Sie beide Sitzplatten in die offen Position, damit der Bewohner / Patient aufgenommen werden kann.



Fahren Sie mit dem K-Mover zum Bewohner / Patienten, sodass dieser mit den Füßen auf der Fussplatte steht.



Arretieren Sie die Feststeller der hinteren Rollen, damit das Gerät gegen ein Wegrollen gesichert ist.



Der Bewohner / Patient, kann sich nun selbständig oder mit leichter Unterstützung vom Personal in eine stehende Haltung gebracht werden



Schliessen Sie beide Sitzplatten, damit sich der Bewohner / Patient zum sicheren Transport in eine sitzende Position bringen kann.



Lösen Sie die Bremsen des K-Movers und transportieren Sie den Bewohner / Patienten mit dem Gerät zum Zielort.

Das Absetzen des Bewohners / Patienten erfolgt im umgekehrter Reihenfolge!

**SICHERHEITSHINWEIS!  
BEIM AUFNEHMEN UND ABSETZEN DES BEWOHNER /  
PATIENTEN MÜSSEN DIE FESTSTELLBREMSEN DES  
GERÄTES IMMER ARRETIERT SEIN, UM EIN WEGROLLEN  
UND SOMIT EINE UNFALLGEFAHR ZU VERHINDERN!**



## Wartung und Pflege

Das Produkt kann zur normalen Reinigung mit einem einfachen Staubtuch / Lappen abgewischt werden.

Alle zwei Monate muss der Rahmen mit einer Polierpaste gereinigt werden. Knie- und Sitzpolster sind aus einem speziellen Material, das zur Pflege mit einem Lederpflegemittel behandelt werden kann, geprüft nach DIN 54020. Die Polster können mit einem trockenen oder feuchten Tuch abgewischt werden.

Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen kann bei Bedarf zum Reinigen verwendet werden, es sollte jedoch unmittelbar nach der Anwendung abgewischt werden. Flecken sollten so schnell wie möglich entfernt werden, um das Eindringen in das Material zu verhindern. Anschliessend sollte das Material mit warmem und sauberem Wasser gereinigt werden. Hartnäckige Verschmutzungen können entfernt werden, wenn diese mit einem Alkohol befeuchtetem Tuch abgerieben werden, das Tuch sollte nicht nass sein. Reinigungsmittel, welche Fette oder Öle enthalten, sollten nicht verwendet werden. Ebenso sollten Lösungsmittel (wie Aceton) und Scheuermittel nicht in Anwendung gebracht werden, um eine Beschädigung der Polster zu verhindern.

Jährlich ist an dem Gerät eine Wartung / Sicherheitstechnische-Kontrolle STK durch geschultes Personal durchzuführen.

VERTRIEB:

**TRanspo** *Reha* **Med**

GRÜNBAUMSTRASSE 89

42659 SOLINGEN

Tel. 0212-645850-0

Fax 0212-645850-50

[www.transporehamed.de](http://www.transporehamed.de)

[info@transporehamed.de](mailto:info@transporehamed.de)

# Produktstammbuch

## Geräte - Stammdaten

Inventar-Nr.:	
Geräteart:	Steh- und Trasnferhilfe
Gerätetyp:	K-Mover
Seriennummer:	
Hersteller:	
Lieferant:	TRanspoRehaMed GmbH
Anschaffungsjahr:	
Standort / betrieblich Zuordnung	









